


## Wichtig

Nimm dir Zeit, die Anleitung sorgfältig zu lesen, bevor du beginnst.

### Dein Urinproben-Set

- A Urin-Röhrchen
- B Schutzverpackung
- C Auffangbehälter

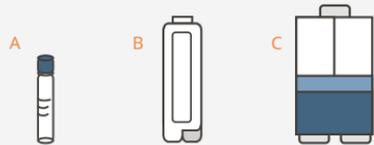

## Tipp

Du kannst entweder, wie unten beschrieben, den Auffangbehälter verwenden oder direkt in das Urinröhrchen urinieren.

## Vorbereitung


### 01 Hände waschen

Hände mit Wasser und Seife waschen.



### 02 Auffangbehälter öffnen

Deckel des Urin-Röhrchens entfernen (aufbewahren!). Auffangbehälter durch vorsichtiges Drücken der Seiten entfalten, so dass sich eine Box bildet.

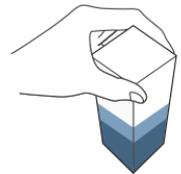

## Probenentnahme


### 03 In Auffangbehälter urinieren

In den Auffangbehälter urinieren, bis der Behälter fast voll ist (bitte den Erststrahlurin verwenden).



### 04 Urin in Röhrchen überführen


Urin in das Urin-Röhrchen umschütten, bis es fast voll ist. Den Rest in die Toilette gießen.

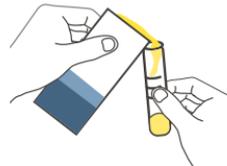

### 05 Schutzverpackung

Deckel des Urin-Röhrchens fest zudrehen, in die Schutzverpackung legen und verschließen.

Zusammen mit den anderen Proben in den Patientenproben-Beutel stecken und mit dem ausgefüllten Probenschein versenden.

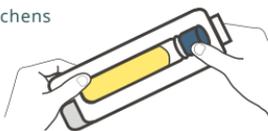

#### Die Urinprobe wird auf Chlamydien und Gonorrhö getestet

Chlamydien und Gonorrhö (Tripper) sind behandelbare Infektionen, die in Penis oder Vagina, im Rachen und im Anus vorkommen können.

Wir werden dir die Ergebnisse per SMS oder Telefon mitteilen und dich auf Wunsch unterstützen und beraten.

Bei einem positiven Befund solltest du für die Behandlung einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen.

Mehr Informationen zu Chlamydien und Gonorrhö findest du auf: [www.samhealth.de](http://www.samhealth.de)

Mehr Informationen  
auf unserer FAQ-Seite

[www.samhealth.de](http://www.samhealth.de)

Noch Fragen? Kontaktiere uns über [sam@dah.aidshilfe.de](mailto:sam@dah.aidshilfe.de) oder per SMS an s.a.m +49 157 35 99 43 80